

evalyn®brush

## تعليمات الاستعمال للاختبار المنزلي

### Rovers Medical Devices

Rovers Medical Devices متخصص في مجال تطوير أدوات لأخذ خلايا من أجل الفحص الطبي. بناء على خبرته التي اكتسبها Rovers Medical Devices على مدى السنين في تطوير منتجات مختلفة خاصة للفحص الطبي وأيضاً في تدقيقها وإنتاجها، يصنع منتجات سليمة وموثوق بها. تنتمي Rovers® Cervex Brush® المطبقة في كل أنحاء العالم - والمعروفة بالمسحة - إلى مجموعة منتجات Rovers Medical Devices.

### كيف مظهر الاختبار المنزلي؟

طول Evalyn®Brush حوالي 20 سنتيمتر وهي متكونة من أنبوب شفاف مع أجنحة صغيرة. في الأنبوب مقبض وردي وفي طرفه الأول زر دوارة وردي وفي الطرف الآخر فرشاة بيضاء. في طرف الفرشاة يوجد غطاء وردي مشدود على الأنبوب. إذا أزلت الغطاء عن الأنبوب، يمكن لك إظهار الفرشاة البيضاء من داخل الأنبوب عن طريق دفع الزر الدوار الوردي باتجاه الأنبوب الشفاف.

صيغة Evafd-2011-09-AR

المنتج: Rovers Medical Devices BV

5347 KV Oss .Lekstraat 10، هولندا

رقم الهاتف: +31 412 648870

رقم الفاكس: +31 412 623835

البريد الإلكتروني: info@roversmedicaldevices.com

الموقع: www.roversmedicaldevices.com



Rovers® Evalyn® Brush هو منتج تم تسجيل

براءة اختراعه وتصميمه.

Rovers® و Evalyn® هما علامتان مسجلتان


يملكهما Rovers Medical Devices B.V.

Oss، هولندا. © Rovers Medical Devices B.V.



CE 0044


STERILE EO

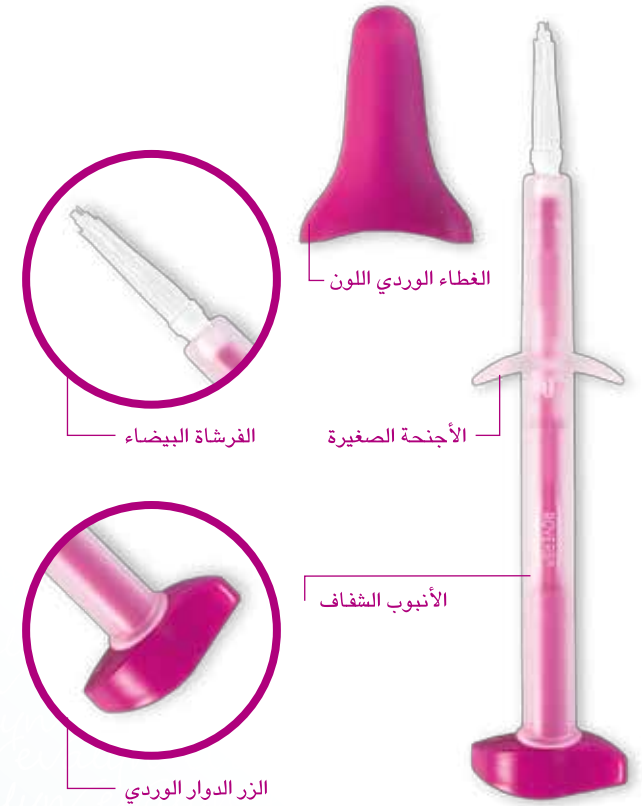


### لماذا Evalyn®Brush؟

Evalyn®Brush هي أداة تم تطويرها خاصة من أجل أخذ مادة من الخلايا الموجودة في الفرج. Evalyn®Brush مجهزة بفرشاة ذات شعر دقيق، لكي تأخذي دائماً ما يكفي من مادة الخلايا.


سهلة وسليمة وأمينة

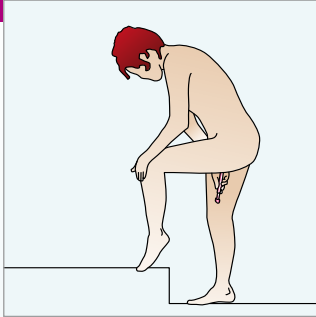


4. قومي بعملية أخذ المادة وأنت واقفة. فقي في وضع مريح (مثلا الوضع الذي تقفين فيه في حالة إدراج حشا).

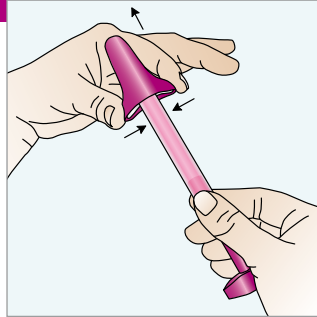


3. اضغطي بالإبهام والسبابة على جنبي الغطاء الوردي وأزيلي الغطاء الوردي عن Evalyn®Brush. لا تمسي فرشاة Evalyn®Brush البيضاء ببديك!

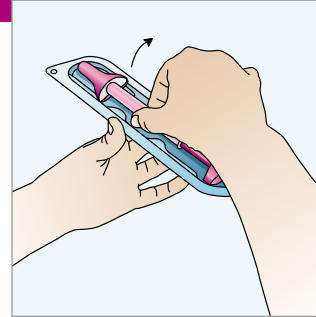


2. أخرجي Evalyn®Brush من غلافها. احتفظي بالغلاف فتحتاجين إليه لإرسال Evalyn®Brush فيه بعد الاستعمال.

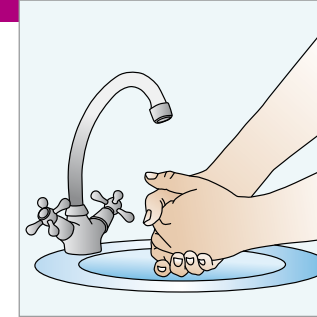


1. أولاً اغسلي يديك قبل البداية.

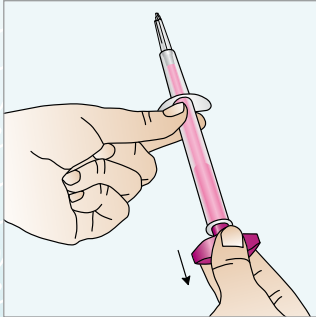


8. أمسكي بالأنبوب الشفاف باليد الأولى وباليد الأخرى تجرّين الزر الدوار الوردي بحيث تختفي الفرشاة البيضاء في الأنبوب. لا تمسي الجزء فوق الأجنحة خلال هذه العملية.

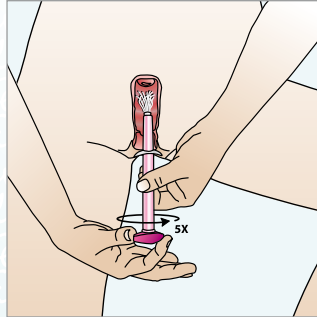


7. أديري الزر الدوار الوردي 5 مرات في نفس الاتجاه. تسمعين صوت طقطقة بعد كل دورة؛ هكذا تعرفين متى تكونين قد أدرتيه 5 مرات. بعد عملية الإدارة تخرجين Evalyn®Brush من الفرج.

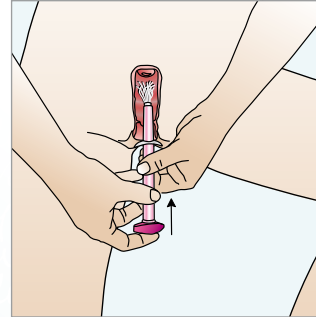


6. أمسكي بالأنبوب الشفاف باليد الأولى وباليد الأخرى تدفعين الزر الدوار الوردي باتجاه الأنبوب الشفاف. تسمعين وتشعرين بصوت طقطقة حينما تصل الفرشاة في موقعها الصحيح، والآن يضع الزر الدوار الوردي مقابل الأنبوب.

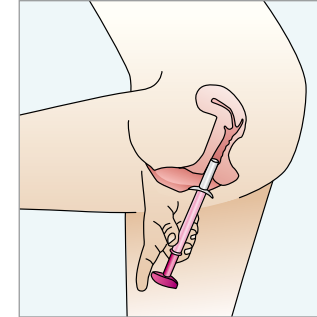


5. مددي الشفرين باليد الأولى وباليد الأخرى تدخلين Evalyn®Brush في الفرج، إلى أن تضغط الأجنحة الصغيرة إلى الشفرين.

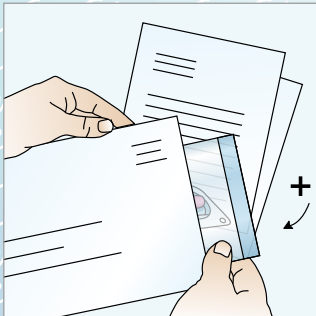


12. استعملي ظرف الإعادة لإرسال الكيس البلاستيكي وفيه Evalyn®Brush وبيان الإذن الممضى وقائمة الأسئلة المملوءة.

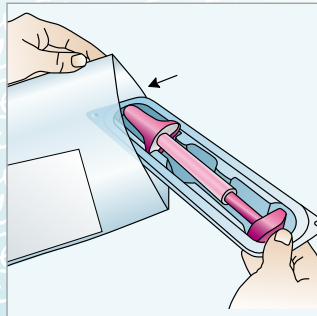

11. ضعي الغلاف وفيه Evalyn®Brush في الكيس البلاستيكي الصغير المرفق ثم أغلقيه.

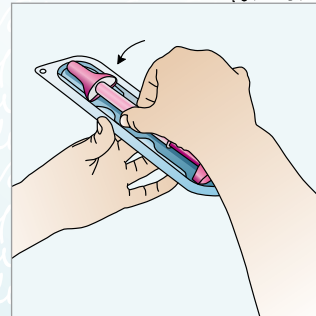

10. رُددي Evalyn®Brush إلى غلافها.

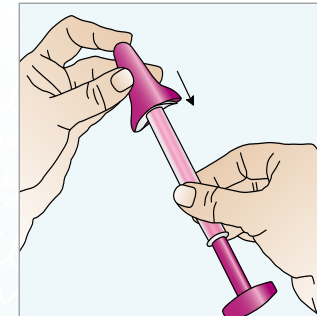

9. أمسكي بالأنبوب الشفاف بحيث لا تخرج الفرشاة البيضاء زاجاً من جديد. رُددي الغطاء الوردي إلى مكانه على Evalyn®Brush بالإبهام والسبابة. عندئذ تسمعين صوت طقطقة.

**أداة Evalyn®Brush** هي أداة معقمة يمكن لك استعمالها بنفسك للقيام باختبار منزلي. باستعمال Evalyn®Brush تأخذين مادة من الخلايا في الفرج بطريقة سهلة وبلا ألم. وبعد ذلك يتم فحص مادة الخلايا هذه في مختبر محترف.

ماذا يجب عليك مراعاته؟

- عدم استعمالها إذا كان غلاف Evalyn®Brush مضراً أو إذا كان تاريخ الصلاحية قد مضى.
- عدم استعمالها خلال الحيض (العادة الشهرية).
- عدم استعمالها خلال الحمل أو في الأشهر الثلاثة اللاحقة.
- التوقف عن استعمال منتجات تستعمل في الفرج قبل استعمال Evalyn®Brush بيومين على الأقل. مع ذلك فيجوز لك الاستمرار في استعمال وسائل لمنع الحمل في الفرج والواقي الذكري (الكبود) والمواد المزلقية.
- تُستعمل لمرة واحدة فقط.
- تؤدي إعادة استعمالها إلى انتقال عدوى وتشخيص غير صحيح.