


## Evde uygulanan test nasıldır?

Evalyn®Brush yaklaşık 20 santim uzun olup, kanatlı transparan bir kalem kaptan oluşmaktadır. Bunun içinde, bir ucunda pembe renkli bir çevirme düğmesi, diğer ucunda ise beyaz fırça bulunan pembe renkli bir çubuk bulunur.

Fırçanın bulunduğu uçta kalem kap bir pembe kapak ile kapatılmıştır. Kapak çıkartıldığında pembe renkli çevirme düğmesini transparan kalem kapa doğru bastırarak beyaz fırçasının kaptan çıkmasını sağlayabilirsiniz.

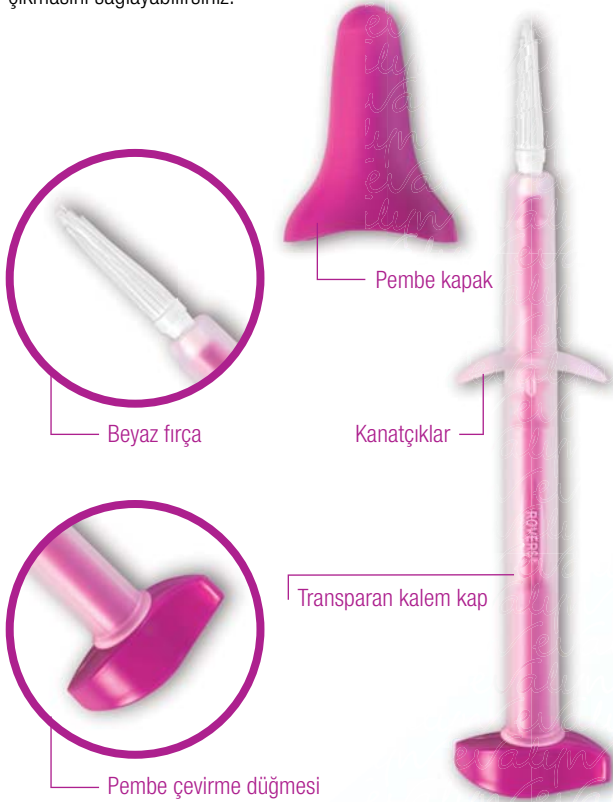

## Evalyn®Brush ne için uygulanır?

Evalyn®Brush vajinadan hücre dokusu almak için özel olarak geliştirilmiş bir enstrümandır. Evalyn®Brush ince kıllı bir fırça ile donatılmış olduğundan, daima yeterli miktarda hücre dokusu alınır.

## Rovers Medical Devices

Rovers Medical Devices tıbbi araştırmalar için hücrelerin alınmasına yönelik enstrümanların geliştirilmesi üzerine uzmandır. Rovers Medical Devices, tıbbi araştırmalar için kullanılan birçok ürünün geliştirilmesi, araştırılması ve üretilmesinde yıllarca edindiği deneyimle güvenli ve güvenilir ürünler yapmaktadır. Dünya çapında uygulanan ve smear testinden tanınan Rovers® Cervex Brush®, Rovers Medical Devices'in ürün serisinde yer almaktadır.

## Evde uygulanan test için kullanma talimatı

Evafid-2011-09-TR versiyonu



Üretici: Rovers Medical Devices BV  
Lekstraat 10, 5347 KV Oss, Hollanda  
Tel. no.: +31 412 648870  
Faks no.: +31 412 623835  
E-posta: info@roversmedicaldevices.com  
İnternet sitesi: www.roversmedicaldevices.com



Rovers® Evalyn®Brush patenti bir ürün olup, tescil edilmiş bir tasarımdır.  
Rovers® ve Evalyn®, Rovers Medical Devices B.V. şirketinin tescil edilmiş ticari markalarıdır. Oss, Hollanda.  
© Rovers Medical Devices B.V.

CE 0044

STERILE EO



## Evalyn®Brush

Evalyn®Brush, testi evde kendi kendinize uygulayabileceğiniz steril bir enstrümandır. Evalyn®Brush ile vajinadan kolay ve acısız bir şekilde hücre dokusu alınır. Bu hücre dokusu sonrasında profesyonel bir laboratuarda araştırılır.

## Neler dikkate alınmalıdır?


- Evalyn®Brush ürünü ambalajı hasarlı olduğu takdirde veya son kullanma tarihi geçmiş olduğunda kullanılmaz.
- Adet döneminde kullanılmaz.
- Hamilelikte veya hamilelikten sonraki 3 ay boyunca kullanılmaz.
- Evalyn®Brush kullanılmadan en az 2 gün öncesinden itibaren vajinal ürün kullanılmamalıdır. Vajinal doğum kontrolü ürünleri, prezervatif ve su bazı kayganlaştırıcı kullanımına ise devam edilebilir.
- Bir defalık kullanım içindir.
- Tekrar kullanılması hastalık bulaşması ve yanlış teşhise yol açar.

## Kolay, güvenli ve güvenilir


Bu kullanma talimatı Evalyn®Brush'un kullanımını için geçerlidir.




1. Başlamadan önce ellerinizi yıkayın.

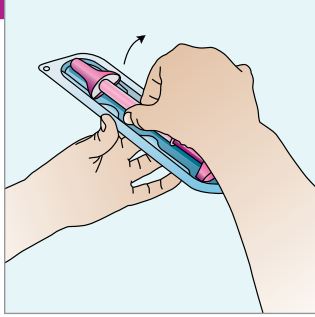


2. Evalyn®Brush'u ambalajdan çıkarın. Ambalajı saklayın, Evalyn®Brush'u kullandıktan sonra göndermeniz için lazım olacak.

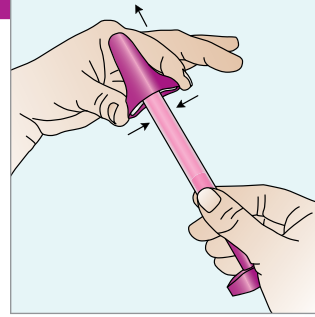


3. Baş parmak ve işaret parmağınızla pembe renkli kapağın yan taraflarına bastırıp, pembe renkli kapağı bu şekilde Evalyn®Brush'un ucundan alın. Evalyn®Brush'un beyaz fırçasına ellerinizle sakın dokunmayın!

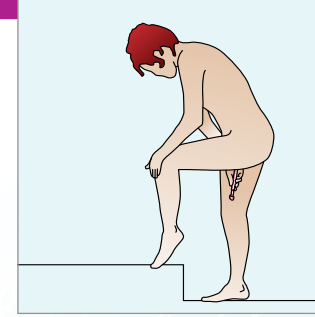


4. Dokunun alınmasını ayakta durarak uygulayın. (Örneğin bir tampon yerleştirdiğiniz gibi) rahat bir pozisyonda durun.

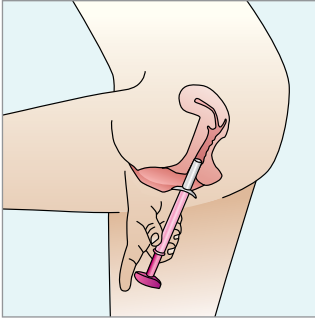


5. Vajinanızın dudaklarını bir elinizle aralayıp diğer elinizle ise Evalyn®Brush'u kanatçıklar dudaklara dayanana kadar vajinanın içine yerleştirin.

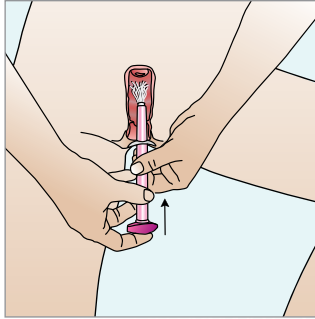


6. Transparan kalem kapı bir elinizle tutup diğer elinizle pembe renkli çevirme düğmesini transparan kalem kapa doğru bastırın. Fırça doğru konuma gelince bir tıklama sesi hissedip duyarsınız. O an pembe renkli çevirme düğmesi kalem kapa değişmektedir.

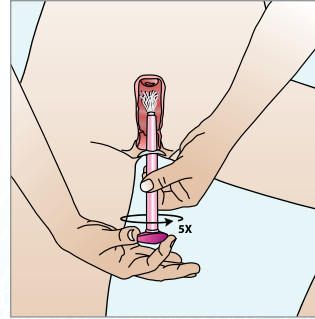


7. Pembe renkli çevirme düğmesini 5 defa aynı yöne tam çevirin. Her tam çevirmede bir tıklama sesi duyarsınız; bu şekilde düğmeyi 5 defa tam çevirmiş olduğunuzu bilirsiniz. Çevirdikten sonra, Evalyn®Brush'u vajinanızdan çıkarın.

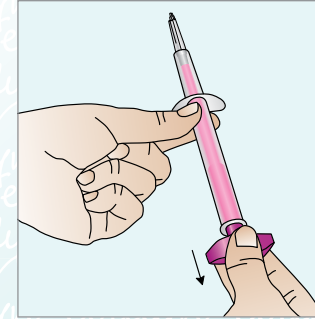


8. Beyaz fırçanın transparan kalem kapı içine saklanması için kalem kapı bir elinizle tutup, diğer elinizle ise pembe renkli çevirme düğmesini geri çekin. Bu sırada kanatların uç kısmındaki bölüme dokunmayın.

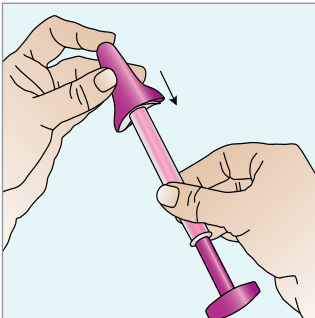


9. Beyaz fırçanın yeniden çıkmaması için transparan kalem kapı elinizle tutun. Pembe renkli kapağı başparmak ve işaret parmağınızla Evalyn®Brush'un ucuna geri yerleştirin. Bu sırada bir tıklama sesi duyarsınız.

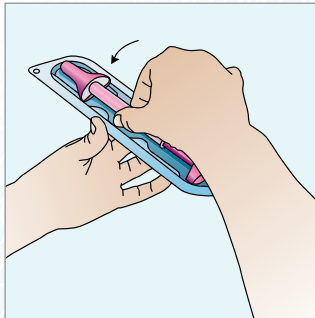

10. Evalyn®Brush'u ambalaja geri yerleştirin.

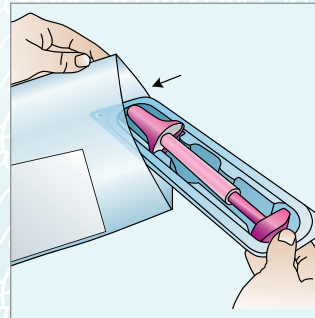

11. İçinde Evalyn®Brush bulunan ambalajı, beraberinde sunulmuş olan poşete yerleştirip, bunu yapıştırarak kapatın.

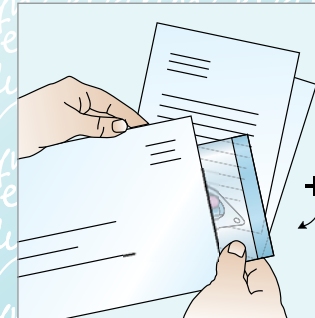

12. İçinde Evalyn®Brush, imzalanmış müsaade belgesi ve doldurulmuş sorular listesi bulunan poşetin gönderilmesi için iade zarfını kullanın.